



# MULTICAREIN

KEMENKES RI AKL 20101715365 (Alat)  
KEMENKES RI AKL 20101715364 (Strip Glukosa)  
KEMENKES RI AKL 20101916606 (Strip Kolesterol)  
KEMENKES RI AKL 20101917635 (Strip Trigliserida)

**3 in 1 POCT**  
**MONITORING KADAR GLUKOSA, KOLESTEROL,**  
**TRIGLISERIDA MANDIRI, CEPAT & AKURAT**

## IMPORTIR DAN DISTRIBUTOR RESMI

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210, Indonesia

P: +62.21.5305073 - 74 | F: +62.21.5304939 | M: +62.811.171.0055 (Call & Whatsapp) |

E: info@isotekindo.co.id

www.isotekindo.co.id



**INFORMASI LEBIH LANJUT,**  
**KLIK ATAU SCAN QR CODE DI ATAS:**



# MULTICAREIN

## FITUR DAN MANFAAT



### Dilengkapi ejektor strip tes

Penggunaan menjadi lebih aman tidak perlu menarik strip tes



### Memori hingga 500 data

Kapasitas memori besar memudahkan validasi hasil uji sebelumnya



### Akurat

Metode pengukuran sudah terstandard ISO 15197: 2015 sehingga akurasinya terjamin



### Penggunaan dapat disesuaikan (*customizable*)

Alat dapat digunakan oleh pria & wanita sudah dilengkapi faktor koreksi sehingga hasil pengukurannya akurat



### Mampu menguji 3 parameter sekaligus (*3in1*)

Kepraktisan dan kemudahan dari sisi penggunaan, sekaligus efisien dari sisi biaya



### Dimensi alat compact, mudah untuk dibawa (*portable*)

Memudahkan penggunaan secara mandiri maupun oleh tenaga kesehatan dimanapun

## SPESIFIKASI

Parameter	Keterangan
Kisaran Uji	10-600 mg/dL ( 0,6-33,3 mmol/L) glukosa 130-400 mg/dL (3,3-10,2 mmol/L) kolesterol 50-500 mg/dL (0,56-5,6 mmol/L) trigliserida
Baterai	2 CR 2032 3V Lithium coin cell battery
Layar	LCD
Memori	500 data
Suhu	10 °C – 40 °C
Waktu Pengukuran	5 detik (glukosa) 30 detik (kolesterol) 30 detik (trigliserida)
Dimensi	97 x 49 x 20,5 mm
Berat	65 g
Volume Sampel	0.5 µL (glukosa) 10 µL (kolesterol) 10 µL (trigliserida)
Output Data	Port USB, Software/Bluetooth

# MULTICAREIN

## CARA PENGGUNAAN

### Langkah 1

Cocokkan antara *code card* dengan *code* yang tertera di wadah tes strip, jika telah sesuai kemudian pasang baterai dan *code card* ke dalam alat.



### Langkah 2

Nyalakan alat kemudian pasang tes strip.



### Langkah 3


Khusus untuk pengujian kolesterol, harap disesuaikan:

- Wanita tekan F, Pria Tekan N.
- Sebelum makan tekan A dan setelah makan tekan P.



### Langkah 4

Kondisikan jari dengan pijatan lembut sebelum menusuk menggunakan lancet, agar sampel darah keluar dengan cukup.

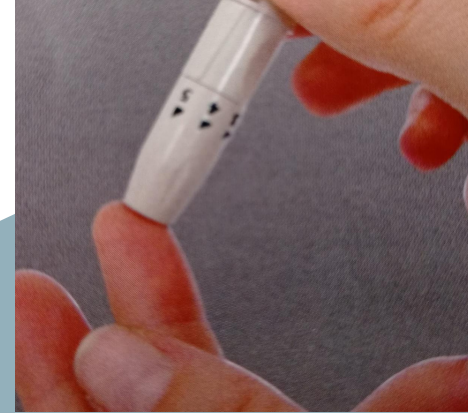

### Langkah 5

Tempelkan tes strip ke tetesan darah sampai meter berbunyi "bip" untuk menunjukkan strip tes memiliki cukup darah untuk diuji. Tunggu hingga alat menunjukkan hasil (berbeda beda untuk tiap parameter).



### Langkah 6

Lepaskan strip uji yang telah digunakan dengan mendorong sakelar ejeksi ke arah depan lalu buang ke keranjang sampah infeksius.



### IMPORTIR DAN DISTRIBUTOR RESMI

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210, Indonesia

P: +62.21.5305073 - 74 | F: +62.21.5304939 | M: +62.811.171.0055 (Call & Whatsapp) |

E: info@isotekindo.co.id

www.isotekindo.co.id



INFORMASI LEBIH LANJUT,  
KLIK ATAU SCAN QR CODE DI ATAS: