

THE EDGE™

Blood Lactate Monitoring System

KEMENKES RI AKL 20101021909 (Alat)

KEMENKES RI AKL 20101918831 (Strip Laktat)



MONITORING TEPAT CEGAH ASIDOSIS LAKTAT

IMPORTIR DAN DISTRIBUTOR RESMI

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210, Indonesia

P: +62.21.5305073 - 74 | F: +62.21.5304939 | M: +62.811.171.0055 (Call & Whatsapp) |

E: info@isotekindo.co.id

www.isotekindo.co.id



THE EDGETM

Blood Lactate Monitoring System

FITUR DAN MANFAAT




Hanya butuh sampel darah sejumlah 3 μ L

Meminimalkan rasa nyeri pada saat pemeriksaan tanpa tusukan yang terlalu dalam



Dimensi alat ramping & mungil (*Pocket Size*)

Mudah untuk dibawa dan digunakan kapanpun dengan praktis

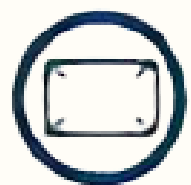

Layar berukuran besar

Memberikan kejelasan pembacaan hasil sehingga menghindari kesalahan paska analitik



Dapat terkoneksi ke komputer

Memudahkan manajemen data secara *real-time*



Rentang pemeriksaan kadar laktat lebar (6 - 200 mg/dL)

Menjamin munculnya hasil uji secara kuantitatif walaupun kadar laktat darah seseorang dalam kondisi sangat rendah maupun tinggi

SPESIFIKASI ALAT

Parameter	Keterangan
Kisaran Uji Kadar Laktat	6 - 200 mg/dL (0.7 - 22.2 mmol/L)
Volume Sampel	Minimum 3 μ L
Kisaran Hematokrit	35% - 50%
Tipe Tampilan	Layar LCD Besar
Memori	300 dengan tanggal dan waktu
Waktu Pengukuran	45 detik
Ukuran	90L x 55W x 20H (mm)
Berat	63 g
Baterai	1 x CR 2032 3V <i>Lithium coin cell battery</i>
Daya tahan baterai	1.000 tes penggunaan
Tombol Pemeriksaan	Tunggal

THE EDGETM

Blood Lactate Monitoring System

CARA PENGGUNAAN

Setelah alat dinyalakan*, berikut langkah penggunaan alat selanjutnya:

Langkah 1

Pasang tes strip ke dalam alat.



Langkah 2

Pijat dengan lembut tangan dan jari ke arah tusukan untuk membentuk setetes darah, kemudian tusuk menggunakan lancet.



Langkah 3

Tempelkan jari ke bagian sensor, layar akan menampilkan bar timing "----", dan hasil akan diperoleh sekitar 45 detik.



Langkah 4

Setelah selesai digunakan, lepaskan strip tes dengan cara ditarik, kemudian buang ke limbah infeksius, sementara alat dapat disimpan kembali. Hasil pengukuran yang dilakukan akan tersimpan secara otomatis.

*Keterangan lebih rinci, dapat dibaca di kertas petunjuk penggunaan

IMPORTIR DAN DISTRIBUTOR RESMI

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210, Indonesia

P: +62.21.5305073 - 74 | F: +62.21.5304939 | M: +62.811.171.0055 (Call & Whatsapp) |

E: info@isotekindo.co.id

www.isotekindo.co.id



INFORMASI LEBIH LANJUT,
KLIK ATAU SCAN QR CODE DI ATAS: