



Accu-Tell® Rapid Syphilis Test (Whole blood/Serum/Plasma)

Accu-Tell® Rapid Syphilis Test adalah tes cepat metoda imunokromatografi untuk deteksi kualitatif kadar antibodi treponemal (IgG dan IgM - Treponema pallidum) dalam serum, plasma darah atau darah *whole blood* untuk tujuan diagnosis penyakit sifilis

Isi 1 box:

- 25 kaset tes
- 1 botol buffer
- 25 pcs droppers
- 1 lembar insert pack

Sensitivitas:

>99,9%

Spesifisitas:

99,7%

Akurasi:

99,8%

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo.intertama | @isotekindo




linktr.ee/isotekindo

20250312/FZR

PROSEDUR PENGGUNAAN

Kondisikan kaset uji, sampel uji (spesimen), buffer, dan/atau cairan kontrol pada suhu kamar (15-30°C) sebelum pengujian

1. Buka kemasan foil dan keluarkan kaset uji. Segera gunakan kaset uji dalam batas waktu 1 jam setelah kemasan dibuka.
2. Letakkan kaset uji pada permukaan yang datar dan bersih.

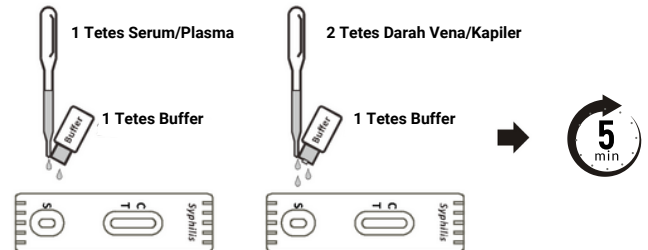

PENGUJIAN DENGAN SAMPEL SERUM ATAU PLASMA

1. Pegang pipet tetes di posisi tegak/vertikal.
2. Gunakan pipet untuk mengambil sampel serum/plasma dan meneteskan 1 tetes (40 µL) sampel pada lubang sampel kaset uji.
3. Tambahkan 1 tetes (40 µL) buffer pada lubang sampel
4. Baca hasil pada 5 menit. **Jangan menafsir hasilnya setelah 20 menit.**

PENGUJIAN DENGAN SAMPEL DARAH VENA/KAPILER

1. Pegang pipet tetes di posisi tegak/vertikal.
2. Gunakan pipet untuk mengambil sampel darah vena/kapiler dan meneteskan 2 tetes (80 µL) sampel pada lubang sampel kaset uji.
3. Tambahkan 1 tetes (40 µL) buffer pada lubang sampel
4. Baca hasil pada 5 menit. **Jangan menafsir hasilnya setelah 20 menit.**

INTERPRETASI HASIL

POSITIF: Muncul dua garis berwarna merah (C & T). Garis berwarna di area kontrol (C) dan garis warna di area uji (T)

Note: Intensitas warna garis bervariasi tergantung kadar antibodi treponemal dalam sampel. Jika garis warna di area uji (T) tampak samar, hasil tes dianggap POSITIF.

NEGATIF: Muncul satu garis warna merah (C). Garis berwarna di area kontrol (C).

INVALID: Tidak muncul satu garis warna merah di area kontrol (C).

Ulangi tes dengan kaset uji yang baru. Volume sampel yang tidak cukup atau teknik prosedur yang salah dapat menyebabkan hasil invalid.



Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20250312/FZR