

ACCU-TELL[®] CHIKUNGUNYA IGG/IGM CASSETTE

(WHOLE BLOOD/SERUM/PLASMA)



Tes cepat dengan metoda imunokromatografi untuk deteksi kualitatif kadar antibodi IgG dan IgM terhadap virus dalam spesimen darah utuh, serum, atau plasma

NIE AKL 20303320970

- Sensitivitas: 99.9%
- Spesifisitas: 99.9%
- Akurasi: 99.9%

Isi dalam 1 box:

- 25 kaset tes
- 1 botol buffer
- 25 pipet kapiler plastik
- 1 lembar petunjuk penggunaan

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

📍 Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | ☎ (021) 5305073-74 | 📞 0811.171.0055

✉ info@isotekindo.co.id | 🌐 www.isotekindo.co.id | 🌐 isotekindo intertama | 📱 @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

PROSEDUR PENGGUNAAN

Kondisikan kaset uji, sampel uji (spesimen), buffer, dan/atau cairan kontrol pada suhu kamar (15-30°C) sebelum pengujian


1. Buka kemasan foil dan keluarkan kaset uji. Segera gunakan kaset uji dalam batas waktu 1 jam
2. Letakkan kaset uji pada permukaan yang datar dan bersih

PENGUJIAN DENGAN SERUM/PLASMA


1. Pegang mikropipet/pipet tetes di posisi tegak atau vertikal
2. Gunakan pipet untuk mengambil sampel serum/plasma dan meneteskan 1 tetes (40 µL) sampel pada lubang sampel kaset uji
3. Tambahkan 1 tetes buffer (40 µL) pada lubang sampel kaset uji
4. Tunggu hingga garis berwarna muncul. Baca hasil pada 15 menit. Jangan menafsir hasilnya setelah 15 menit

PENGUJIAN DENGAN DARAH VENA/KAPILER

1. Pegang mikropipet/pipet tetes di posisi tegak atau vertikal
2. Gunakan pipet untuk mengambil sampel darah vena/kapiler dan meneteskan 1 tetes (40 µL) sampel pada lubang sampel kaset uji
3. Tambahkan 1 tetes buffer (40 µL) pada lubang sampel kaset uji
4. Tunggu hingga garis berwarna muncul. Baca hasil pada 15 menit. Jangan menafsir hasilnya setelah 15 menit

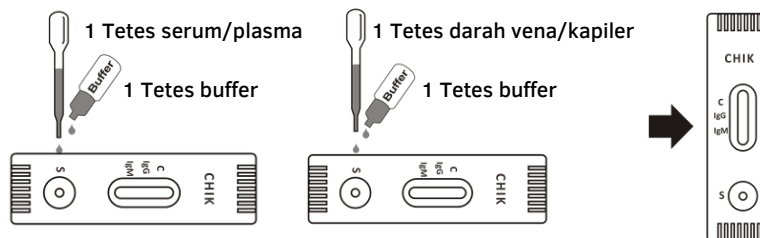

INTERPRETASI HASIL

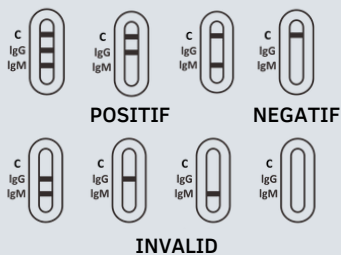

POSITIF: Muncul dua atau tiga garis berwarna di area kontrol (C) dan garis warna di area uji (IgG, IgM)

Note: Intensitas warna garis bervariasi tergantung kadar konsentrasi CHIK IgG dan/atau IgM dalam sampel. Jika garis warna di area uji (T) tampak samar, hasil tes dianggap POSITIF

NEGATIF: Muncul satu garis warna (C). Garis berwarna di area kontrol (C)

INVALID: Tidak muncul satu garis warna di area kontrol (C).

Ulangi tes dengan kaset uji yang baru. Volume sampel yang tidak cukup atau teknik prosedur yang salah dapat menyebabkan hasil invalid

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo