



KEMENKES RI AKL 20101917636 (Alat)
KEMENKES RI AKL 20101915723 (Strip Glukosa)

**CEK GULA DARAH ANDA
DENGAN MUDAH**

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

📍 Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | 📞 (021) 5305073-74 | 📱 0811.171.0055

✉ info@isotekindo.co.id | 🌐 www.isotekindo.co.id | 🌐 isotekindo intertama | 📺 @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

GlucoSure AutoCode

FITUR DAN MANFAAT

Sampel darah yang diperlukan sedikit (0.5 µL)



Penggunaan menjadi lebih nyaman karena tidak membutuhkan pengambilan sampel dalam jumlah besar

Waktu pengukuran cepat (6 detik)



Tidak membuang banyak waktu untuk mengukur kadar gula darah

Alternate Site Testing (AST)



Mengurangi resiko nyeri karena sampel dapat di ambil selain dari bagian jari misalnya paha & telapak tangan

Alat terkoneksi dengan komputer



Memudahkan manajemen data yang diperlukan suatu institusi seperti RS atau Laboratorium Klinik

Tidak membutuhkan code card (Autocode)



Penggunaan menjadi jauh lebih mudah, cukup dengan menyalakan alat dan memasukkan strip tes ke dalam alat

SPESIFIKASI

Parameter	Keterangan
Kisaran Uji	20~600 mg/dL (1.1~33.3 mmol/L)
Kalibrasi	Plasma
Kisaran Hematocrit	35~50%
Tipe Tampilan	LCD screen
Memori	300 hasil tes darah dengan tanggal dan waktu
Hasil rata-rata	7, 14, dan 30 hari
Ukuran	76L x 45W x 15.5H (mm)
Berat	29g
Baterai	1 x CR 2032 3V Lithium coin cell battery
Daya tahan baterai	1.000 tes penggunaan
Matikan Otomatis	Setelah 1,5 menit tidak aktif



linktr.ee/isotekindo

GlucoSure AutoCode

CARA PENGGUNAAN

Langkah 1

Setelah baterai dipasang, masukkan strip tes ke dalam alat dan alat otomatis akan menyala.



Langkah 2

Kondisikan jari dengan pijatan lembut sebelum menusuk menggunakan lancet, agar sampel darah keluar dengan cukup.



Langkah 3

Tempelkan tes strip ke tetesan darah sedikit miring sampai meter berbunyi 'bip' untuk menunjukkan strip tes memiliki cukup darah untuk diuji.




Langkah 4

Layar akan menghitung mundur selama 6 detik, kemudian akan muncul hasil pengukuran gula dalam darah pada layar.



PERFORMA AKURASI PRESISI UJI GLUKOSA

Menurut ISO1597:2015

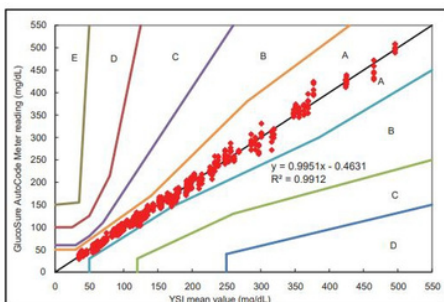

ISO 15197 : 2015		
Sample < 100 mg/dL		
±5 mg/dL	±10 mg/dL	±15 mg/dL
125 / 180	174 / 180	180 / 180
69%	97%	100.0%
Sample ≥ 100 mg/dL		
±5%	±10%	±15%
271 / 420	397 / 420	419 / 420
65%	95%	99.8%

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo