

KEMENKES RI AKL 20101916668 (Alat)
KEMENKES RI AKL 20101918693 (Strip Glukosa)
KEMENKES RI AKL 20101918572 (Strip Keton)



MultiSure GK

Blood Glucose and Ketone Monitoring System

Pastikan Pola Hidup Diet Anda Terkontrol Secara Mandiri

Informasi lebih lanjut, klik atau scan QR code:



PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, 12210 | ☎ 021-5305073/74 | 📞 08111710055
✉ info@isotekindo.co.id | 🌐 www.isotekindo.co.id | 📍 Isotekindo Intertama | 📱 @isotekindo

linktr.ee/isotekindo

MultiSure GK

Blood Glucose and Ketone Monitoring System

FITUR DAN MANFAAT



Waktu pemeriksaan singkat



Alat dapat menguji 2 jenis tes (2 in 1)



Alat berukuran kecil (*Pocket Size*)




Sampel darah yang diperlukan sedikit (0.5 µL - 0.8 µL)

SPESIFIKASI

Parameter	Keterangan
Kisaran Uji	20 ~ 600 mg / dL (1,1 ~ 33,3 mmol / L) untuk uji glukosa 0,1 ~ 8,0 mmol / L untuk uji keton
Kalibrasi	Plasma
Kisaran Hematokrit	10 ~ 70% untuk uji glukosa 20 ~ 60% untuk uji keton
Ukuran Sampel Darah	≥ 0,5 µL untuk uji glukosa ≥ 0,8 µL untuk uji keton
Jenis Sampel	Darah kapiler segar
Tipe Tampilan	Layar LCD dengan pencahayaan belakang
Memori	500 hasil tes dengan tanggal dan waktu untuk tes glukosa 100 hasil tes dengan tanggal dan waktu untuk tes keton
Hasil rata-rata	Rata-rata 1, 7, 14, 30, 60, dan 90 hari
Ukuran	96L x 58W x 16H (mm)
Berat	49 g (tanpa baterai)
Baterai	2 sel baterai CR 2032 3V Lithium coin cell
Daya tahan baterai	1.000 tes penggunaan terus menerus atau satu tahun
Matikan Otomatis	Setelah 1.5 menit tidak aktif


PERFORMA AKURASI PRESISI

1. Glukosa Menurut ISO 1597:2015

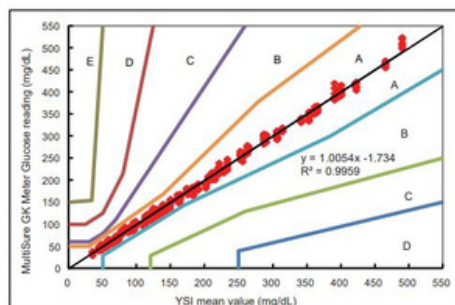

ISO 15197 : 2015		
Sample < 100 mg/dL		
±5 mg/dL	±10 mg/dL	±15 mg/dL
146 / 198	196 / 198	198 / 198
74%	99%	100.0%
Sample ≥ 100 mg/dL		
±5%	±10%	±15%
317 / 402	393 / 402	401 / 402
79%	98%	99.8%

2. Keton

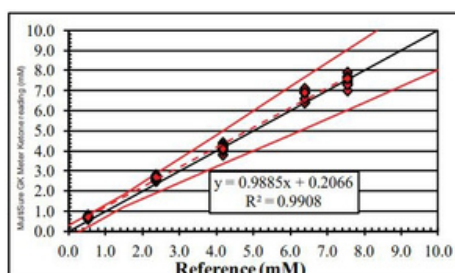

Lot 1		
Mean.	S.D.	C.V.
0.7	0.05	---
2.6	0.11	4.0
4.1	0.17	4.1
6.8	0.24	3.5
7.5	0.26	3.4

Informasi lebih lanjut, klik atau scan QR code:



linktr.ee/isotekindo


MultiSure GK

Blood Glucose and Ketone Monitoring System

CARA PENGGUNAAN


Langkah 1

Masukkan Strip Tes Glukosa Darah MultiSure GK untuk menghidupkan meter.

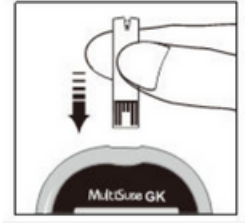

Langkah 2

Tunggu hingga tetesan darah berkedip dan ikon strip tes muncul disebelah kiri layar tampilan meteran.

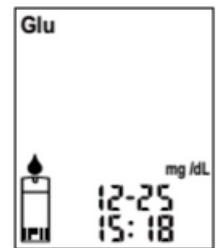


Langkah 3

Perlahan bawa test strip dan sentuh tetesan darah sedikit miring sampai meter berbunyi bip untuk menunjukkan strip tes memiliki cukup darah untuk diuji.



Langkah 4

Layar akan mulai menghitung mundur, hasil pengujian glukosa Anda akan muncul di layar tampilan meter.

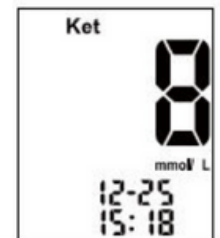

Langkah 5

Lepaskan strip uji yang digunakan baik dengan menekan sakelar ejeksi lalu ambil dan buang ke keranjang sampah infeksius.

Informasi lebih lanjut, klik atau scan QR code:



PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, 12210 | ☎ 021-5305073/74 | 📞 08111710055
✉ info@isotekindo.co.id | 🌐 www.isotekindo.co.id | 📺 Isotekindo Intertama | 📱 @isotekindo

linktr.ee/isotekindo