

# ACCU-TELL<sup>®</sup> TB CASSETTE

(WHOLE BLOOD/SERUM/PLASMA)

Tes cepat dengan metoda imunokromatografi untuk deteksi antibodi (IgG, IgM dan IgA) terhadap infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* secara kualitatif dalam spesimen darah utuh, serum, atau plasma.

- Sensitivitas: 83.8%
- Spesifisitas: 98.8%
- Akurasi: 95.7%

Isi 1 box:

- 25 kaset tes
- 1 botol buffer
- 25 pipet kapiler plastik
- 1 lembar petunjuk penggunaan



NIE AKL 20303320948

Importir dan Distributor Resmi:

**PT ISOTEKINDO INTERTAMA**

 Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 |  (021) 5305073-74 |  0811.171.0055

 [info@isotekindo.co.id](mailto:info@isotekindo.co.id) |  [www.isotekindo.co.id](http://www.isotekindo.co.id) |  [isotekindo intertama](https://www.linkedin.com/company/isotekindo-intertama) |   [@isotekindo](https://www.instagram.com/isotekindo)



[linktr.ee/isotekindo](https://linktr.ee/isotekindo)


## PROSEDUR PENGGUNAAN

Kondisikan kaset uji, sampel uji (spesimen), buffer, dan/atau cairan kontrol pada suhu kamar (15-30°C) sebelum pengujian

1. Buka kemasan foil dan keluarkan kaset uji. Segera gunakan kaset uji dalam batas waktu 1 jam
2. Letakkan kaset uji pada permukaan yang datar dan bersih


### Pengujian dengan serum/plasma

1. Pegang mikropipet/pipet tetes di posisi tegak atau vertikal
2. Gunakan pipet untuk mengambil sampel serum/plasma dan meneteskan 3 tetes (75 µL) sampel pada lubang sampel kaset uji
3. Tunggu hingga garis berwarna muncul. Baca hasil pada 10 menit. Jangan menafsir hasilnya setelah 30 menit

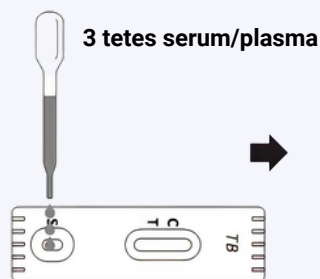

### Pengujian dengan darah vena/kapiler

1. Pegang mikropipet/pipet tetes di posisi tegak atau vertikal
2. Gunakan pipet untuk mengambil darah vena/kapiler dan meneteskan 3 tetes (75 µL) sampel pada lubang sampel kaset uji
3. Tambahkan 1 tetes buffer (40 µL) pada lubang sampel kaset uji
4. Tunggu hingga garis berwarna muncul. Baca hasil pada 10 menit. Jangan menafsir hasilnya setelah 30 menit

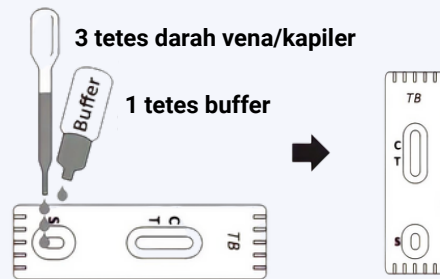

### Interpretasi Hasil



**POSITIF NEGATIF INVALID**

**POSITIF: Muncul dua garis berwarna di area C & T.**

*Note: Intensitas warna garis bervariasi tergantung kadar antibodi anti-TB dalam sampel. Jika garis warna di area uji (T) tampak samar, hasil tes dianggap POSITIF*

**NEGATIF: Muncul satu garis warna (C).** Garis berwarna di area kontrol (C)

**INVALID: Tidak muncul satu garis warna di area kontrol (C).**

*Ulangi tes dengan kaset uji yang baru. Volume sampel yang tidak cukup atau teknik prosedur yang salah dapat menyebabkan hasil invalid*

Importir dan Distributor Resmi:

**PT ISOTEKINDO INTERTAMA**

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo